

mediven[®] thrombexin[®] 18

Meia de compressão medicinal de profilaxia da trombose com 18 mmHg de compressão no tornozelo.

Indicações

- Profilaxia física da trombose para pacientes imobilizados, no período pré, intra e pós-operatório
- Puérperas
- Pacientes acamados
- Prevenção de edemas e hematomas

Modo de acção

O pré-requisito para obter a aceleração profilática e eficaz do fluxo sanguíneo é o gradiente de pressão correcto, ou seja, decrescente de distal para proximal. O nosso conceito experimentado e testado da tecnologia de elasticidade nos dois sentidos torna possível proporcionar o nível máximo de cuidados com a gama mais restrita de tamanhos de meias, para perímetros até 100 cm na coxa.

Características

- Meia de malha anatómica com um gradiente de pressão preciso
- Manuseamento simples e que poupa tempo. Alivia a pressão da equipa de enfermagem e otimiza os cuidados ao paciente
- Sistema de tamanhos com código de cor para uma selecção rápida e simples do tamanho correcto da meia
- Adesão acrescida graças à elevada elasticidade e à malha especialmente macia, agradável para a pele e de respiração activa
- Elevada eficácia graças à múltipla utilização



Vantagens do produto

mediven thrombexin 18 garante sempre as características ideais de pressão: a compressão na perna reduz-se continuamente de distal para proximal.




Banda de fixação inteligente

A banda de fixação em silicone, especialmente desenvolvida, evita o deslizamento da meia, indicando de imediato o ajuste correcto na perna.



Calcanhar com código de cor

O calcanhar com código de cor, com superfície interior aveludada, reduz o perigo de úlceras de pressão, simplifica a escolha do tamanho e mostra se o calcanhar assenta devidamente.

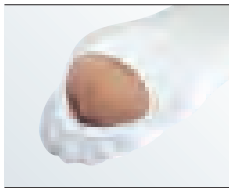

Abertura para inspecção

A inspecção não obstrutiva na sola do pé permite inspeccionar a circulação e reduz o perigo de queda.




Biqueira higiénica

O fio antibacteriano e antimicótico usado na zona da biqueira, melhora a higiene e reduz o risco de infeção.

Auxiliar para calçar

A inovadora calçadeira medi Hospital Butler torna o calçar das meias medicinais para prevenção da trombose venosa, simples e fácil, para o pessoal hospitalar e doentes.

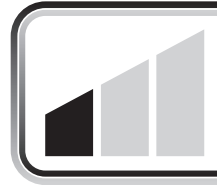

Compressão suave adaptada às necessidades de doentes acamados ou imóveis.

* Medidas de números inteiros

No sentido de facilitar o manuseamento e a legibilidade, todas as medidas são indicadas em números inteiros de centímetros. Eventuais tamanhos em falta são cobertos por tolerâncias de medidas e de produção. Aplicam-se as regras internacionalmente reconhecidas relativas ao arredondamento por defeito ou por excesso (por defeito até 4/10, por excesso até 5/10). Isto já foi levado em consideração pelo fabricante nas fitas métricas de papel fornecidas.

Até ao joelho (AD)							
Tamanho	Medidas do membro inferior* (perímetro em cm)					Código de cor	
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo do joelho cD	Coxa cG	Altura AD	Tornozelo	Coxa
XS	17 – 19	26 – 32	25 – 31	–	35 – 46	laranja	–
S	20 – 22	30 – 38	29 – 37	–	35 – 46	verde	–
M	23 – 25	34 – 44	33 – 43	–	35 – 46	violeta	–
L	26 – 28	38 – 48	37 – 47	–	35 – 46	azul	–
L-X	26 – 28	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	cinzento	–
XL	29 – 31	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	vermelho	–
XXL	32 – 34	51 – 66	50 – 65	–	35 – 46	castanho	–
Até à coxa (AG)							
XS	17 – 19	26 – 36	25 – 35	40 – 50	60 – 84	laranja	laranja
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	verde	verde
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	verde	cinzento
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violeta	violeta
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	violeta	cinzento
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	azul	azul
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	azul	cinzento
XL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	72 – 90	65 – 89	vermelho	vermelho
XL-X	29 – 31	42 – 55	41 – 54	80 – 100	65 – 89	vermelho	cinzento
Até à coxa com cinto (AGT)							
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	verde	verde
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violeta	violeta
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	azul	azul
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	azul	cinzento