

Informação sobre o produto

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este produto é um cinto de tecido que lhe permite executar exercícios de força, alongamento e de mobilidade articular em todos os grupos musculares (braços e pernas).

Muito versátil, pode também, ajudar a trabalhar a força de tração dos músculos de todo o corpo, permitindo um maior tónus corporal.

MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO

Este produto deve ser guardado num local seco.

Evite a exposição direta ao Sol.

Pode ser lavado e higienizado conforme indicação da etiqueta de composição.

Evite a utilização de ténis ou sapatos que possam danificar o tecido.

Deve utilizar o tecido (cinto) descalço ou com meias aderentes.

ADVERTÊNCIAS

O exercício físico é benéfico, mas deve ser sempre feito de um modo controlado e seguro.

Antes de iniciar qualquer tipo de programa de exercício deve consultar o seu médico.

Qualquer tipo de movimento desajustado ao seu corpo pode ser prejudicial e causar lesões graves.

Se já possuí lesões antigas, se padece de alguma doença, ou se encontra grávida, aconselhamos que se dirija ao seu médico e obtenha uma autorização para a realização ou utilização deste produto.

Este produto não pode ser utilizado por crianças sem autorização ou supervisão de um adulto.

GARANTIA COMERCIAL

A marca Holistic Belt, garante este produto durante 1 ano, caso se comprove defeito de fabrico ou do tecido, sendo que a data da fatura é o comprovativo da mesma.

A obrigação da marca Holistic Belt em virtude desta garantia limita-se à substituição ou reparação do produto, à descrição da mesma.

Os produtos nos quais a garantia se aplica têm de ser recebidos pela autora da marca, na morada descrita, com portes pagos, acompanhados pela prova de compra.

Esta garantia não se aplica no caso de:

- Desaparecimento ou danos causados no decorrer do transporte.
- Utilização incorreta ou anómala.
- Reparações efetuados por terceiros não autorizados pelo vendedor oficial.
- Utilização para fins comerciais.

Esta garantia não exclui a garantia legal aplicável segundo os países e/ou províncias.

SEGURANÇA

LEIA COM ATENÇÃO AS PRECAUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO

1- Leia com atenção todas as instruções deste manual antes de utilizar este produto.

Conserve este manual durante o tempo de vida do produto.

2- Cabe ao proprietário deste produto assegurar-se de que todos os utilizadores deste produto foram informados das precauções de utilização.

3- A marca Holistic Belt descarta-se de qualquer responsabilidade decorrente de queixas devido a lesões, ferimentos ou danos infligidos a qualquer pessoa ou bem, causados pela utilização incorreta deste produto pelo comprador ou por qualquer pessoa.

4- Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico. Não usar para contexto comercial, de aluguer ou institucional.

5- Utilize o produto no interior de um local amplo e sem obstáculos, numa superfície plana sem ser escorregadia, ao abrigo de partículas de poeiras ou humidade.

Não guarde o produto em local húmido (piscinas ou casa de banho, etc.).

6- Certifique-se que o local de utilização do produto é totalmente seguro, sem risco de escorregar ou ter algum acidente.

7- Não utilize ténis com este produto para não danificar o tecido.

8- É da responsabilidade do utilizador verificar a deterioração do produto. Em caso de degradação do mesmo, este não deve ser usado.

Deve entrar em contato com o Atelier de Motricidade e Educação Postural e reportar.

Não repare o produto.

9- Para se proteger de escorregar durante os exercícios assegure-se que usa o produto descalça numa superfície aderente ou utiliza meias próprias antiderrapantes.

Não use roupas muito largas descaídas que possam ficar presas causando acidente.

Retire todos os adornos, bijuterias ou jóias antes de fazer qualquer tipo de exercício.

10- Mantenha sempre as crianças e os animais afastados do produto.

11- Se sentir dor, desconforto, vertigens, náuseas, enjoou, durante a prática do exercício, pare imediatamente e consulte o seu médico.