



## MÓDULO GRADE LATERAL CAMA PLUS + Ref. 823107 AR04+





### Importante:

Guarde estas instruções num local seguro para referência futura. Ler cuidadosamente todas as instruções antes de iniciar a montagem e instalação.

- Largura : 90 cm
- Altura : 50,5 & 52,5 cm
- Comprimento : 41 cm


### Lista de componentes

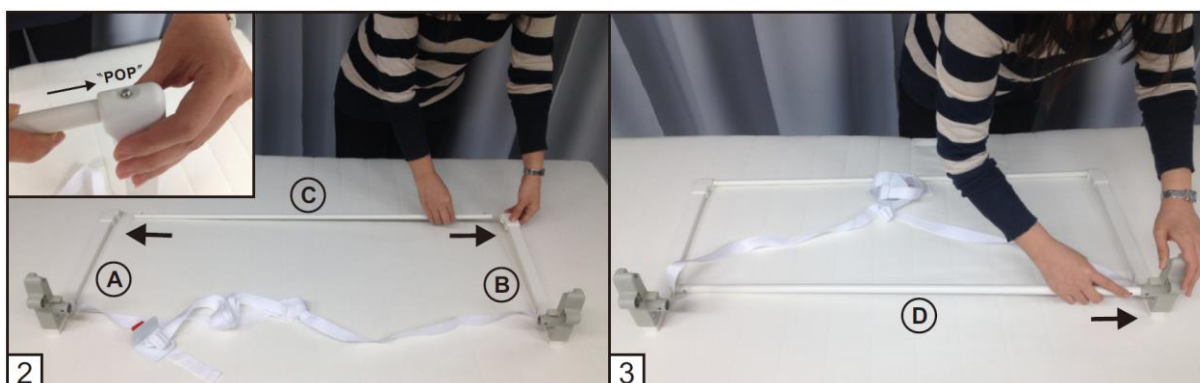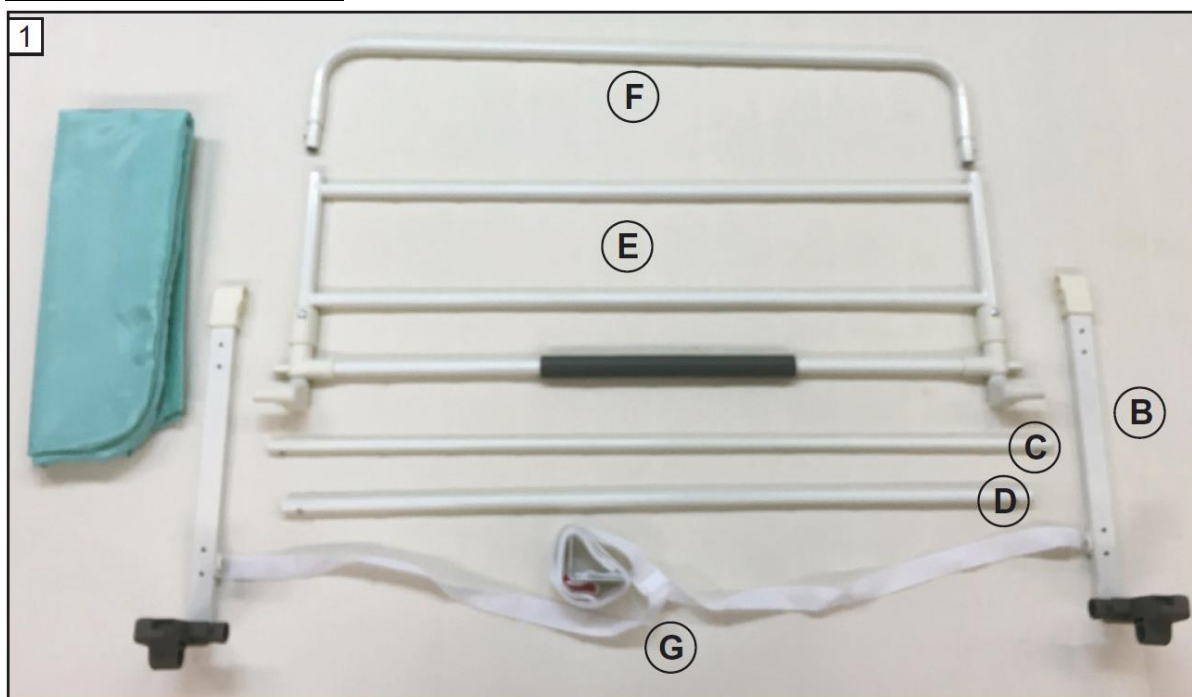

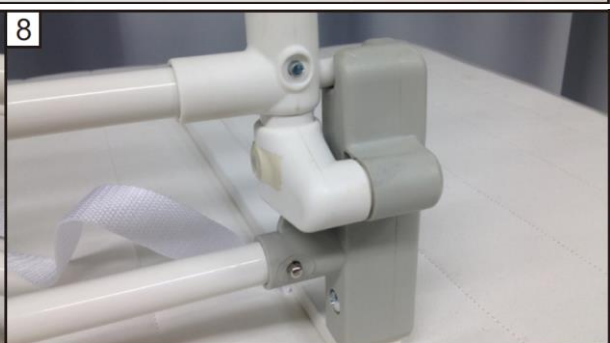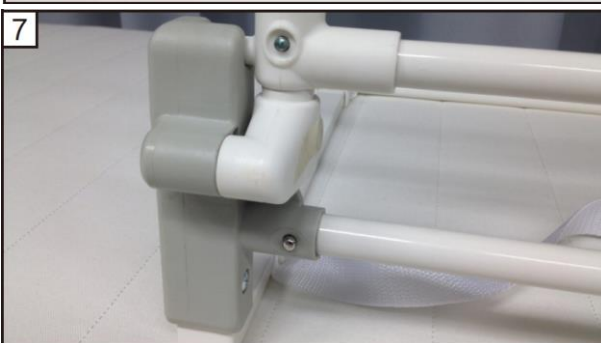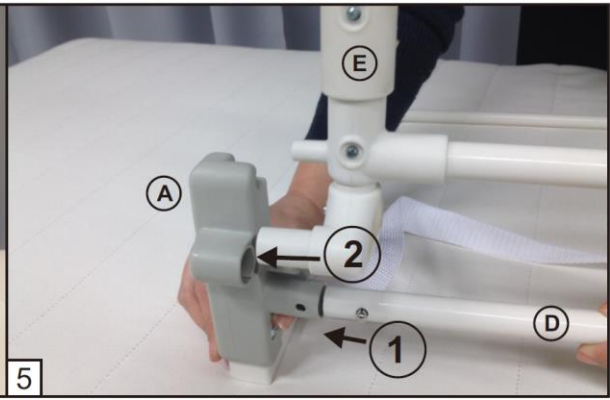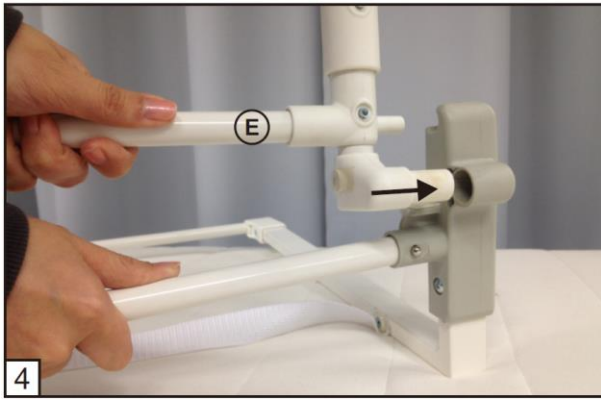



11

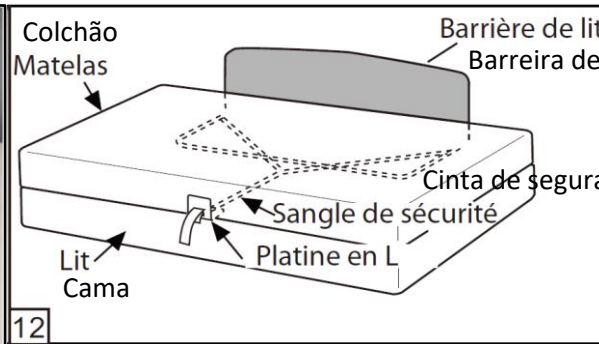

12




13



14

Nota : A correia de fixação deve ser apertada para que o portão esteja seguro.

Nota : Colocar o comprimento restante da alça debaixo do colchão.

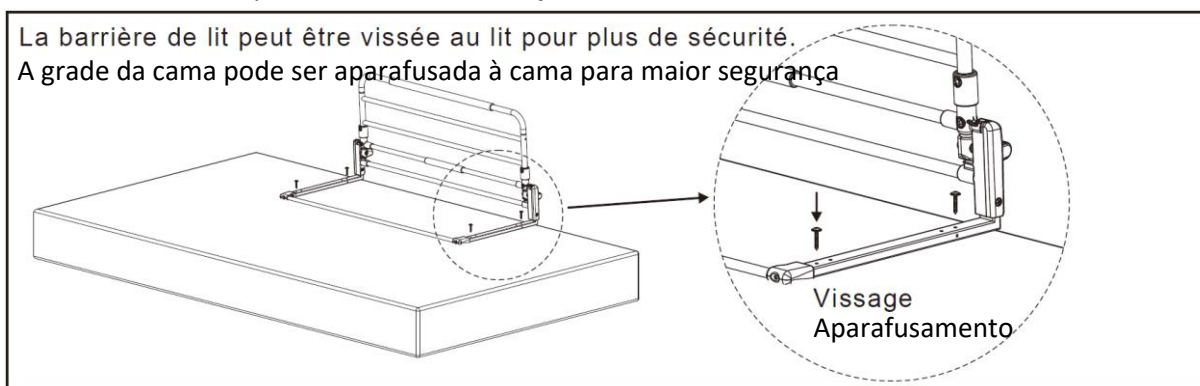


15

OK



## Utilização :

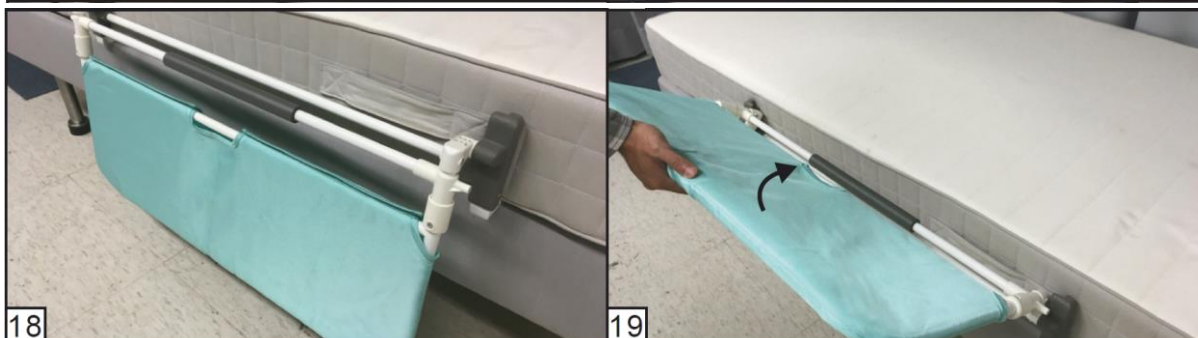

Existe 2 alturas de ajuste possíveis



Desaperte os parafusos de ambos os lados.

Selecionar os orifícios superiores para a posição mais alta, e apertar os parafusos em ambos os lados.

## PRECAUÇÕES :

### LIMPEZA :

Limpar o varão com água morna e um detergente neutro. Usar um pano macio para evitar arranhões.

Nunca utilizar solventes para a limpeza.

### ATENÇÃO :

- 1 Nunca utilizar o trilho se algum dos componentes estiver em falta ou partido. Não substituir peças defeituosas com outras peças não aprovadas pelo seu revendedor. A utilização de peças sobressalentes não aprovadas pode tornar o produto inseguro.
- 2 Verificar regularmente se todas as fixações e componentes estão presentes, seguras e em bom estado.
- 3 Verificar se os fechos estão devidamente apertados e se o mecanismo de fecho está a funcionar correctamente.

Para mais informações :

IDENTITES

Rue de la Forgerie - ZA Pôle 49 - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 -  
www.identites.eu